

## Studien belegen:

### *mehr Freiheit für Sie*

- > Renew reduziert ungewollten Stuhlabgang um **82%\***.
- > Hohe Anwenderzufriedenheit\*\*.
- > Es wurden keine schweren, ernsten oder unerwarteten Nebenwirkungen beobachtet.

### *Ann:*

#### **„Ich bin zurück im Leben!**

Mit den Renew Einsätzen habe ich wieder das Selbstvertrauen zu reisen, zu tanzen und alle Dinge zu tun, die ich liebe.“

Ann nahm an der Renew Studie teil.



## Mit freundlicher Empfehlung:

### *Ihr Renew-Team*

Weitere Informationen zu Renew finden Sie auf der Internetseite

[www.renew-einsatz.de](http://www.renew-einsatz.de)

*Haben Sie noch mehr Fragen?*

**Wir helfen Ihnen!**

Hotline: 0800 7363933

Mall: [kontakt@renew-medical.de](mailto:kontakt@renew-medical.de)

**Renew**  
EINSATZ

*„Einfach ein sicheres Gefühl!“*



**Neu & Revolutionär**

**Ihre zuverlässige Hilfe  
bei Darmschwäche**

## Sie sind nicht alleine:

### *Mut zur Offenheit*

**Wussten Sie, dass in Deutschland etwa vier Millionen Menschen von Darmschwäche betroffen sind?**

Durch den wiederkehrenden unkontrollierten Verlust von Stuhl erfahren viele Betroffene massive Einschnitte in ihrer Lebensqualität.

Wie gerne würden Sie endlich wieder spontan das Haus verlassen oder sorgenfrei Ihrer Arbeit oder Ihrem Hobby nachgehen?

## Einfach ein sicheres Gefühl:

### **Mit Renew.**

\* Renew Clinical Study 210CLD

\*\* Bei einem Verbraucherpanel, das Renew über 35 Monate in Großbritannien durchführte, wurde die durchschnittliche Zufriedenheit mit 4,8 von 5 (extrem zufrieden) bewertet.

## Zurück ins Leben:

*sicher & leicht!*

Erleben Sie unser revolutionäres Hilfsmittel und gewinnen Sie Ihr unbeschwertes Leben zurück. Denn die Renew Einsätze sind so konzipiert, dass Schutz, Komfort und eine einfache Handhabung zugleich gewährleistet werden.

- > Perfekte Anpassung an Ihren Körper – ohne Druckgefühl durch flexibles und hautverträgliches Silikon
- > Einfache und hygienische Handhabung durch praktischen Applikator
- > Sicherer Sitz durch obere und untere Scheibe



## Perfekter Sitz:

*einfach & angenehm*

Nach dem Einführen dichtet der Renew Einsatz aus Silikon den Darmausgang von innen ab und hilft ungewollten Stuhlabgang zu verhindern. Ihr besonderer **Vorteil**: kein unangenehmes Druckgefühl, denn der Einsatz ist durch seine ideale Anpassung und die geringe Größe kaum spürbar.



Bei der nächsten Darmentleerung wird der Renew Einsatz ausgeschieden. Sie können den Einsatz auch jederzeit durch Ziehen an der unteren Scheibe selbst herausziehen. Um den optimalen Schutz zu gewährleisten, verwenden Sie nach jedem Stuhlgang einen neuen Einsatz.

## Antworten auf Ihre Fragen\*:

*kurz & präzise*

### 1. Wie lange kann ich einen Renew Einsatz tragen?

Renew Einsätze können Tag und Nacht getragen werden. Ein einzelner Einsatz kann bis zum nächsten Stuhlgang verwendet oder nach Wunsch gewechselt werden.

### 2. Kann ein Renew Einsatz in meinem Körper „verloren gehen“?

Nein. Die obere und untere Scheibe halten ihn in Position. Falls der Einsatz doch in den Anus oder das Rektum verrutscht, wird er mit Ihrem nächsten Stuhlgang einfach ausgeschieden.

### 3. Kann ich mit dem Renew Einsatz baden und mich körperlich betätigen?

Ja. Sie können alle Ihre Aktivitäten ausüben, während Sie einen Renew Einsatz verwenden.

### 4. Wie weiß ich, welche Größe des Renew Einsatzes ich verwenden soll?

Verwenden Sie zuerst den Renew Einsatz in der Größe Normal. Wenn er unerwartet herausrutscht oder Stuhlverlust auftritt, probieren Sie die große Größe.

**Testen Sie!**  
Die Starterpackung 5/5 dient zum Finden der richtigen Größe.

\* Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung

## Testen Sie auf Rezept!

*Hinweise für Ihren Arzt*

Scheuen Sie sich nicht Ihren Arzt anzusprechen.

Die Krankenkasse übernimmt normalerweise die Kosten für Sie, es gilt dann lediglich die gesetzliche Zuzahlungsregelung von 10% pro Packung, höchstens jedoch 10 Euro pro Monat. Das Budget Ihres Arztes wird nicht belastet. Denn der Renew Einsatz ist ein Inkontinenz-Hilfsmittel und als solches im Hilfsmittelverzeichnis gelistet.

Zeigen Sie diese Broschüre Ihrem Arzt und lassen Sie sich beraten, wie Renew auch Ihr Leben verbessern kann.

### Beispielrezept für eine Monatsversorgung

Art-Nr.	Größe	Stk/VE	PZN	HMV
702	Starterpackung (Normal/Groß)	5/5	11022393	15.25.17.0011
706	Normal	30	11022401	15.25.17.0011
FG731	Groß	30	11022418	15.25.17.0011

\*\* Verbrauch in Stück/Monat: 60 Einsätze. Dieser Richtwert dient als Anhaltspunkt und kann vom tatsächlichen Verbrauch abweichen. Quelle: BVMed